

SIENINÄYTTEIDEN OTTO

Näyte

Näytteenottoväline

Lähete

Huomioi

Näyte

Näytteenottoväline

Lähete

Huomioi

Karvanäyte




KARVA
• Sieniviljely, dermatofyytit (sis. natiivi)

Karvojen nyppiminen:
• Käytä steriiliä pinsettä tai suonipuristinta
• Nypi vaurioituneet karvat kokonaisina rupeutumisen alueelta
• Valitse erit. Woodin lampulla fluoresoivia karvoja

Hammasharjatekniikka:
• Harjaa ensin terve alue ja sitten leesiot
• Näytteenä erityisesti leesien reunat
• Myös oireettomien seurantaan (eläimen koko harjaus)


Raape- ja kynsinäyte

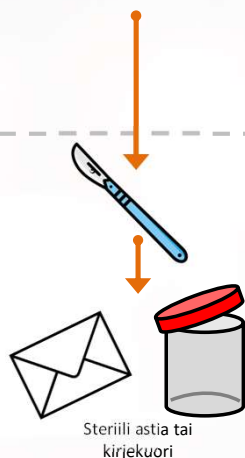

RAAPE/KYNSI
• Sieniviljely, dermatofyytit (sis. natiivi)

Ihoraape:
• Raaputa leesioalueen reunoilta materiaalia skalpellin tylpällä reunalla
Kynsinäyte:
• Puhdista kynnen vesipesulla tai 80 % alkoholilla
• Näytteeksi raaputetaan steriilillä veitsellä raapetta ja leikataan kynnestä pieniä palasia


Ihobiopsia ja kudospalat

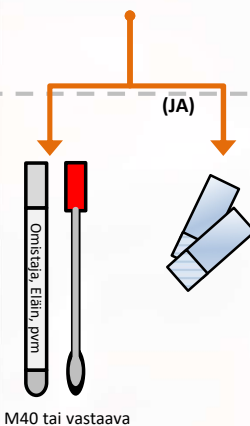

IHOBIOPSIA
• Sieniviljely, pinnallinen/syvä (sis. natiivi)
KUDOSPALA
• Sieniviljely, pinnallinen/syvä (sis. natiivi)

• Paina kudospala kuljetuselatusainetikon geelin sisälle
• **Huom!** Mahdollisen preparaattilasin tekoa varten tulee käyttää erillistä kudospalaa (kaksi palaa/puoliksi leikattu) tai tehdä sively palasta steriilillä vanutikulla (kontaminaatoriski)


Silmänäyte

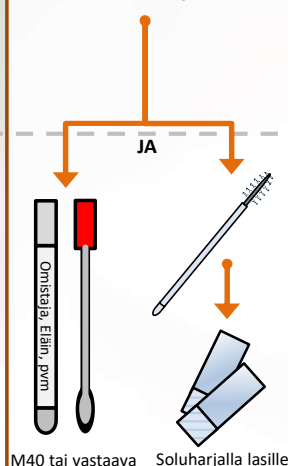

SILMÄ
• Sieniviljely, pinnallinen/syvä (sis. natiivi)

• Pyri saamaan näytteeksi mahdollisimman paljon materiaalia
• **Huom!** Samaa tikkua ei voi käyttää sekä näytteen levittämiseen objektilasille että viljelyyn (kontaminaatoriski).


Steriilit nesteet, paiseet, hengitystienäytteet, vagina

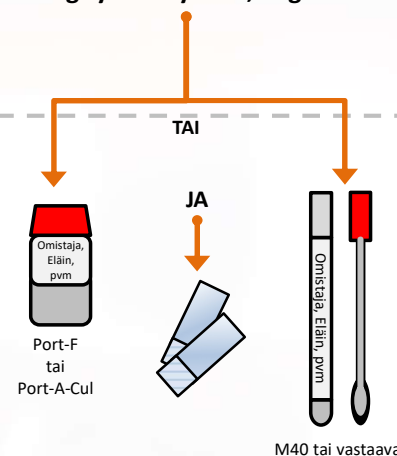

IHOPAISE
• Sieniviljely, pinnallinen/syvä (sis. natiivi)
STERIILIT NESTEET, VAGINA
• Sieniviljely, pinnallinen/syvä (sis. natiivi)
HENGITYSTIENÄYTTEET
• Sieniviljely, hengitystie (sis. natiivi)

• Aspiraattit (nesteet): Puhdista ja desinfioi ihoalue
• Puhdista ampullin kumitulppa alkoholilla, älä avaa korkkia
• Ilman pääseminen näytekuljetuspulloon ei haittaa tutkimusta
• **Huom!** Levitä preparaattilasi jo klinikalla ja ilmaa ilmakuvaa se; samaa tikkua ei voi käyttää sekä näytteen levittämiseen että viljelyyn (kontaminaatoriski).

LÄHETYS

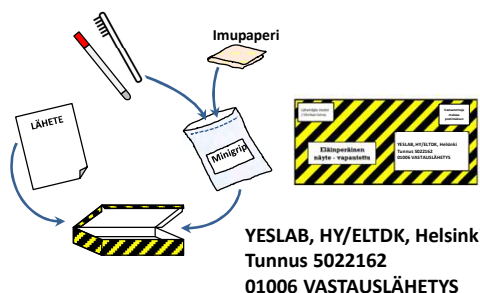

TÄRKEÄÄ

- Kaikki sienitutkimukset sisältävät natiivinäytteen suoramikroskopoinnin
- Dermatofyyttinäytteet säilytetään **huoneenlämmössä**
- Muut näytteet säilytetään **jääkaapissa**
- Neulalla varustettuja ruiskuja **ei saa lähettää**
- Merkitse näytteeseen **potilas- ja näytetiedot**
- Toimita näyte postiin samana päivänä. Yli 3 vrk vanhojen näytteiden tulosten luotettavuus heikkenee.

OTA YHTEYTTÄ

yeslab@helsinki.fi

Tekniset asiat (mm. läheteiden teko, näytteenottotarvikkeet, näytteiden lähetykset):
029 41 40350 (ark. 8-15)

Laboratoriovastausten tulkinta (eläinlääkärit):
029 41 57478 (ark. 8-15)



HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA
VETERINÄRMEDICINSKA FAKULTETEN
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

YESLAB